

## Chirana CHEESE® Lift

Стоматологическая установка CHIRANA CHEESE LIFT – это стационарная установка, на которой подвешено кресло SK1.01, так называемый концепт SIDE-LIFT. В отличие от других решений стоматологических установок, Cheese L выделяется стройным привлекательным дизайном, сохраняя крепкую конструкцию и стабильность стоматологической установки. Установка удовлетворяет электрическому стандарту CHIRANA, который выделяется низким напряжением (12/24V) в проводках и питании электроники всей стоматологической установки включая двигатели для подъема кресла.



от 462 000 ₹

Установку можно комплектовать держателем для LCD монитора и интраоральной камерой, трау-столиком с жестким или пантографическим плечом.

### Столик врача:

**Столик врача с простой клавиатурой из фольги, негатоскопом и возможностью размещения до 5 инструментов.**

Управление столика врача с клавиатуры из фольги позволяет:

- включение/выключение охлаждения инструментов
- реверс оборотов микродвигателя
- включение/выключение автоматической продувки инструментов
- дезинфекцию шлангов инструментов
- ручную регулировку оборотов и мощности инструментов
- включение/выключение освещения инструментов с подсветкой
- регулировка настроенных значений оборотов и мощности инструментов
- программирование функций
- управление негатоскопом, находящимся на столике
- включение/выключение и настройку продолжительности наполнения стакана
- включение/выключение и настройку продолжительности смыва плевательной чаши
- включение/выключение светильника

- управление движениями кресла включая программирование
- остановку движения кресла кнопкой STOP
- отображение оборотов и мощности на индикационной шкале
- применение дополнительной функции функции Giromatic
- у всех инструментов, кроме пистолета, блокировку одновременного включения

Световая и акустическая индикации ухода за инструментом (смазка): продлевает срок жизни ротационных инструментов. Эта функция позволяет измерение чистого времени наработки каждого ротационного инструмента в отдельности. После достижения предела времени, после которого необходимо провести уход за инструментом, запускаются акустический и световой сигнал. Этот сигнал будет звучать всегда при вынимании неочищенного инструмента из гнезда, до того момента пока врач не выполнит уход за инструментом, и запустит таймер времени заново

Встроенный обратный клапан в системе подачи воды на наконечники предотвращает обратное всасывание охлаждающего спрея из наконечников

Блокировка движения кресла и хода инструментов: не возможно движение кресла, работая с инструментом.

Механическая или пневматическая фиксация столика врача по вертикали

Нижнее или верхнее подключение шлангов инструментов по желанию заказчика

Возможность настройки кол-ва охлаждающей воды для каждого инструмента отдельно с клавиатуры управления столика врача

Возможность встройки инструментов с подсветкой LED

Возможность широкого выбора инструментов:

- 3-функциональные и 6-функциональные пистолеты CHIRANA и Luzzani
- Турбинные наконечники MIDWEST, без подсветки, с подсветкой
- Микродвигатели без подсветки, с подсветкой, бесщеточные CHIRANA, Bien Air
- УЗ скалеры без подсветки, с подсветкой (EMS, Chirana LM)
- Пневматический скалер CHIRANA
- Полимеризационная лампа Mectron
- Тепловой коагулятор
- Интраоральная камера CHIRANA

### **Столик ассистента:**

Столик ассистента с простой клавиатурой из фольги

Столик ассистента 2N – с возможностью размещения 1–2 держателей

Столик ассистента 4N – с возможностью размещения 1–4 держателей

Плеча столика ассистента:

- на удлиненном поворотном плече
- на плече с настройкой по высоте

Управление функциями столика ассистента:

- управление наполнением стакана и смыва чаши
- выбор источника воды: водопровод /PZTV
- управление движениями кресла включая программирование
- включение/выключение светильника

Возможность выбора инструментов:

- 3-функциональный пистолет (Chirana, Luzzani)
- Шланг отсасывателя с соплом
- слюноотсос
- полимеризационная лампа Mectron

### **Блок плевательницы:**

Поворотная (в направлении к пациенту) фарфоровая чаша плевательницы

Системы для центрального отсасывания (сухое и мокрое): эжекторная система, сепарационные автоматки Cattani и Durr CS1, ловушка амальгамы Metasys Compact Dynamic и Durr CAS1, мокрое отсасывание Durr MSBV

Блок плевательницы можно дополнить:

- Системой дезинфекции внутренней проводки воды и шлангов инструментов
- Системой дополнительного резервуара чистой воды (PZTV)
- Переключающим клапаном для выбора источника воды: водопровод /PZTV

### **Система плеч светильника:**

Пантограф с дугой с цветными крышками (система плеч Exclusive)

### **Светильники:**

- FARO EDI
- FARO EDI с датчиком
- FARO EDI с боковыми креплениями
- FARO EDI с датчиком и боковыми креплениями
- FARO MAIA LED
- FARO ALYA LED
- FARO ALYA LED с датчиком

### **Аксессуары:**

Дополнительный к столику врача столик

Трау-столик под столиком врача с силиконовым подносом

Трау-столик под столиком врача с подносом из нержавеющей стали

Трау-столик с поворотным или с пантографическим плечом на стойке светильника с силиконовым подносом

другие возможности оснащения трау-столика:

- второй дополнительный несущий поднос

- замена подноса - нержавеющей
- дополнительное оснащение tray-столика рукояткой
- дополнительное оснащение держателем стакана
- дополнительное оснащение держателями флаконов

Плечо монитора

TV Монитор Chirana 19“s DVD/USB

Камера Chirana

### **Ножные управляющие устройства:**

Ножной выключатель (активация инструментов)

Ножной выключатель с кнопками (активация инструментов, функция продува, включение/выключение спрея)

Ножное управляющее устройство (регулировка оборотов ММ и мощности УЗ скалер, продув, включение/выключение спрея)

Ножное управляющее устройство multifunctionальное - управление установкой (регулировка оборотов ММ и мощности УЗ скалер, продув, включение/выключение спрея) и креслом

Ножное управляющее устройство multifunctionальное pedalное - управление установкой (регулировка оборотов ММ и мощности УЗ скалер, продув, включение/выключение спрея) и креслом.

### **Шкаф подводов:**

Шкаф подводов встроен в блоке плевательницы установки

### **Другие возможности:**

Возможность комплектации установки с передвижным на тележке „cart“ столиком врача Cheese Easy SU

Широкая гамма цветов